

STYLUS

Girello deambulatore in alluminio con
quattro ruote

Manuale d'uso (IT)



REHASENSE



ITALIANO

1. Informazioni di base

Gentile Cliente,

La ringraziamo per l'acquisto del nostro dispositivo medico. Il presente manuale d'uso contiene tutte le informazioni importanti inerenti all'uso sicuro e corretto del prodotto denominato in seguito "girello".

Prima del primo utilizzo del girello si prega di leggere e comprendere l'intero contenuto del presente manuale e rispettare tutte le nostre raccomandazioni.

Rehasense continua a migliorare i propri prodotti e si riserva il diritto di apportare le modifiche alle specifiche del prodotto senza preavviso.

Se siete interessati dei nostri prodotti, si prega di contattare i rivenditori autorizzati o direttamente Rehasense. I recapiti di contatto sono disponibili all'ultima pagina del manuale d'uso.

2. Destinazione d'uso, indicazioni e contrindicazioni

Destinazione: Il girello è stato creato come dispositivo di supporto della mobilità delle persone che hanno problemi a stare in piedi, camminare o sedersi. Grazie al nostro supporto queste persone possono stare in piedi o sedersi senza l'aiuto di altri, il che gli permette di tornare a molte attività quotidiane. Altro uso è vietato.

Indicazioni: Il dispositivo è particolarmente raccomandato a persone che (a causa di diversi problemi di salute) richiedono un ausilio coadiuvante stabile quando camminano. È stato progettato appositamente per gli utenti con artrite e/o forza limitata alle mani che non sono in grado di sostenersi sui polsi ma possono comunque utilizzare gli avambracci come supporto.

Controindicazioni: il supporto non deve essere utilizzato da persone che hanno gravi problemi di mantenimento dell'equilibrio, con grave debolezza dei muscoli scheletrici, il che gli impedisce di stare in piedi o camminare in autonomia. L'uso del supporto deve essere raccomandato da un fisioterapista o medico.

3. Fornitura e descrizione generale del prodotto

I girelli sono forniti in un imballo di cartone, piegati per il trasporto.

L'imballo include:

- ✓ n. 1 girello piegato con schienale, borsa per la spesa e porta stampelle
- ✓ n. 1 manuale d'uso

STYLUS è un girello leggero con quattro ruote e telaio pieghevole. Il dispositivo è eseguito in alluminio, per cui è leggero e facile da trasportare e stoccare. Il prodotto consente una facile manovrabilità, stabilità e regolazione in altezza delle maniglie. Il prodotto è costituito da un telaio in alluminio verniciato a polvere con un telaio a croce pieghevole. Inoltre viene fornito con un sedile in tessuto e una borsa della spesa che consente all'utente di riposare e trasportare piccoli oggetti.

Il set di accessori in dotazione dipende dall'ordine specifico.

4. Requisiti e sicurezza

Prima dell'uso leggere attentamente il manuale. Il produttore non è responsabile di danni o incidenti risultanti dall'uso incorretto.



Resistenza massima / uso


- Il carico massimo del dispositivo è di 150 kg.
- Di regola la borsa della spesa può sostenere il carico fino a 5 kg.
- Il girello è destinato all'uso sia all'interno che all'esterno.
- Non può essere impiegato/spinto quando è utilizzato per sedersi.
- Prima di utilizzare il sedile i freni DEVONO trovarsi in posizione bloccata.



Come evitare lesioni

- Utilizzare il dispositivo soltanto secondo la sua destinazione.
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente in buone condizioni tecniche.
- È vietato manomettere il dispositivo, a meno che non si sia in possesso di un consenso scritto del produttore.
- Prestare particolare attenzione quando si regola l'altezza delle maniglie per evitare di schiacciarsi le dita o altre parti del corpo.
- Utilizzare il dispositivo solo su una superficie piana e liscia.
- Tutte le ruote devono essere sempre a contatto con il suolo. Così si può mantenere la corretta stabilità e prevenire un incidente.


SE SI VERIFICA UN INCIDENTE GRAVE CONNESSO CON L'USO DEL PRODOTTO, INFORMARNE IMMEDIATAMENTE IL VENDITORE O IL PRODUTTORE REHASENSE (recapiti di contatto alla fine del manuale). Intraprendere immediatamente le azioni previste nel Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici.

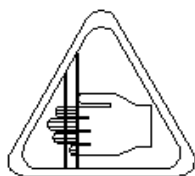

Attenzione alle dita

ATTENZIONE: Prestare particolare attenzione quando si vede questo segno. Le dita o altre parti del corpo possono rimanere schiacciate quando si piega, si apre o si regola l'altezza del dispositivo. Prestare attenzione a tutte le fessure e le aperture nella struttura del dispositivo.

5. Descrizione del dispositivo

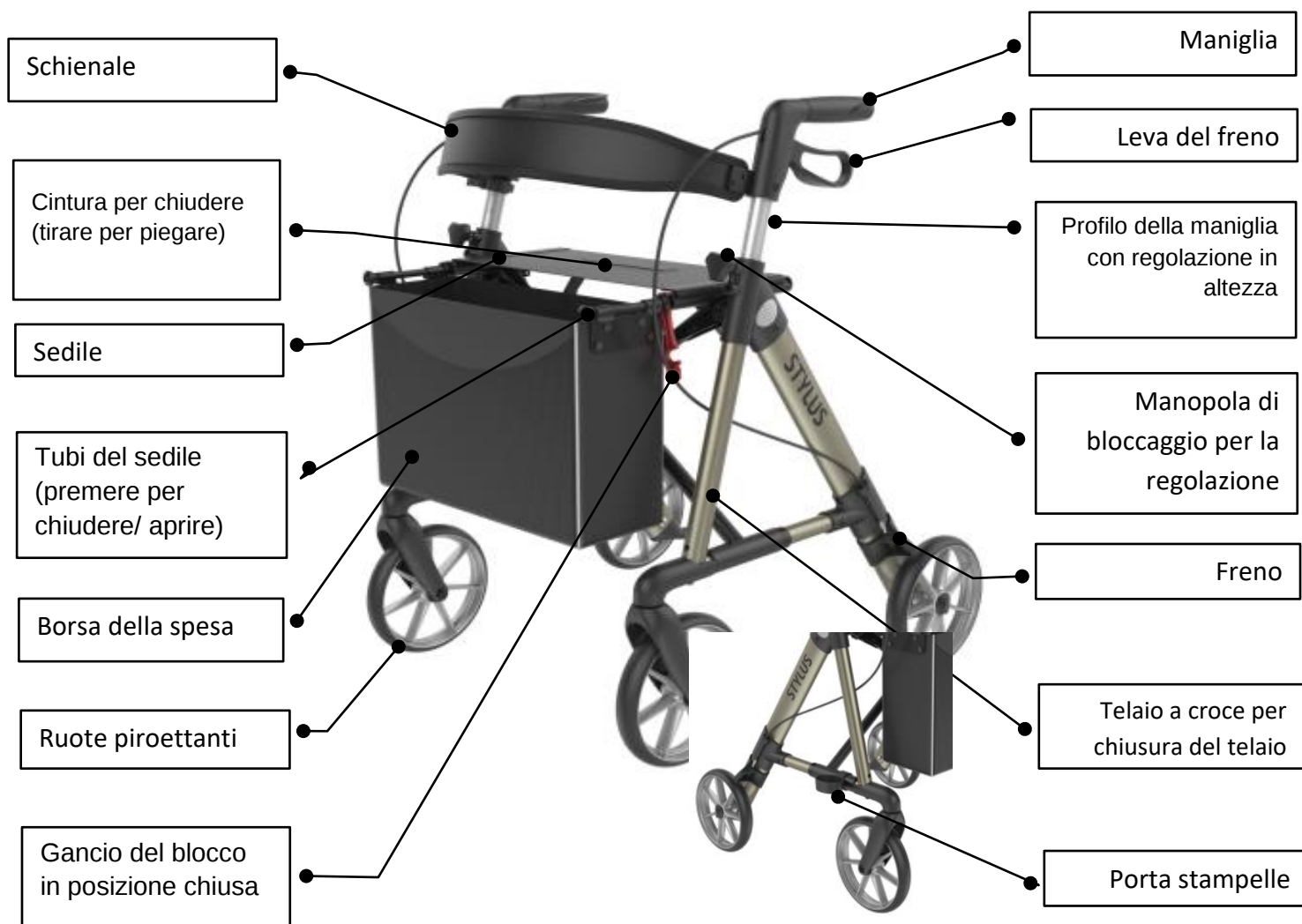

La foto soprastante mostra il prodotto esemplare con il posizionamento dei suoi elementi di base. Il tuo rollator ed i suoi componenti possono (a seconda della versione) avere aspetto diverso da quello mostrato sopra ma il loro nomi e le posizioni rimangono invariati.

6. Utilizzo

Guardando l'immagine soprastante, l'uso dovrebbe essere intuitivo. Tuttavia si consiglia di rispettare le seguenti raccomandazioni:

Primo controllo

Dopo aver disimballato il prodotto, controllare prima se il prodotto è completo e se tutte le parti visibili nella foto sono nell'imballo. Se si notano parti mancanti, contattare immediatamente il rivenditore.

Assemblaggio del girello

- Per sbloccare i tubi del sedile, sganciare il gancio
- Afferrare entrambi i tubi laterali del sedile e premerli verso il basso fino a quando il telaio non si ripiega e non si senta un "clic".
- Provare a tirare verso l'alto i tubi del sedile per piegare il telaio. Se ciò non è possibile, vuol dire che il telaio è dispiegato correttamente e in una posizione sicura. Vedere la posizione aperta nella foto sopra



Dopo aver aperto o piegato/chiuso il prodotto, assicurarsi sempre se il sedile sia bloccato saldamente da un meccanismo di cinture di bloccaggio e che il telaio non si muova più.

- *Verificare sempre se le manopole di bloccaggio per la regolazione dell'altezza siano ben avvitate per evitare che i profili portanti scivolino fuori*
- *Verificare sempre se gli accessori siano montati correttamente e saldamente PRIMA dell'uso.*
- *La mancata osservanza di tale condizione può provocare lesioni personali*

Chiusura del girello

- Sollevare la cintura (maniglia) sul sedile per chiudere il girello.
- Piegare il girello fino al bloccaggio.
- Bloccare con gancio rosso



Regolazione dell'altezza delle maniglie

- Sbloccare la manopola
- Regolare l'altezza desiderata
- Bloccare la manopola



- *Posizionare entrambe le maniglie alla stessa altezza .*
- *Le maniglie posizionate correttamente devono trovarsi all'altezza delle anche dell'utente*
- *Non lasciare mai il dispositivo con freni sbloccati.*

Uso del freno a mano

- PER FRENARE IL GIRELLO, semplicemente tirare le maniglie del freno verso le maniglie.
- IN POSIZIONE DI RIPOSO tenere la leva del freno in alto.
- PER MUOVERSI sbloccare i freni. I freni si abbasseranno in automatico e saranno sbloccati.



- *Bloccare sempre i freni quando il girello è in posizione di riposo.*
- *Non lasciare mai il dispositivo senza freni attivati quando il sedile è occupato!*
- *Non lasciare mai il dispositivo sul pendio con freni sbloccati!*
- *Si consiglia di sedersi all'inizio del sedile facendo attenzione alla borsa.*
- *Sedersi dritti e sostenersi con le maniglie.*
- *Non inclinarsi indietro mentre si è seduti*

Blocco/sblocco del freno

- Per sbloccare i freni premere la maniglia del freno fino a sentire un "clic".
- Per sbloccare il freno tirare le maniglie del freno in alto fino a quando non si allentino.



- *In posizione di riposo i freni DEVONO essere sempre bloccati*



Inclinare / superare gli ostacoli

Il girello è dotato di un supporto di inclinazione su entrambi i lati per poter superare gli ostacoli come soglie, cordoli, etc.

- Tirare i freni, appoggiare il piede sulla leva, spingerla verso il basso e tirare le maniglie verso di sé per alzare da terra le ruote anteriori.
- Tenere il tallone sul pavimento per mantenere l'equilibrio.



Sedersi sul girello

Puoi sederti sul sedile per riposare un po'.

- Azionare prima entrambi i freni di stazionamento.
- Ora girati e siediti.
- Siediti tra le maniglie.
- Puoi appoggiare le braccia sulle maniglie.
- Non sedersi troppo in profondità, troppo lontano.



- *Non sederti mai troppo profondamente o parzialmente sulla tua borsa della spesa*
- *Non inclinarsi mai indietro.*
- *Non sedersi mai sul supporto senza i freni inseriti.*


Come comandare e girare il girello

- Grazie alle ruote anteriori leggere e facili da ruotare, il deambulatore è molto facile da manovrare in avanti, lateralmente o indietro e può essere ruotato sul posto.
- Basta posizionare la mano sulle maniglie, tenere le maniglie di spinta e spingere il girello nella direzione desiderata



Elementi catarifrangenti

Per motivi di sicurezza, il girello è dotato di 6 elementi catarifrangenti visibili al buio: 2 sui lati, 2 sulle maniglie e 2 cuciture riflettenti sulla borsa della spesa.

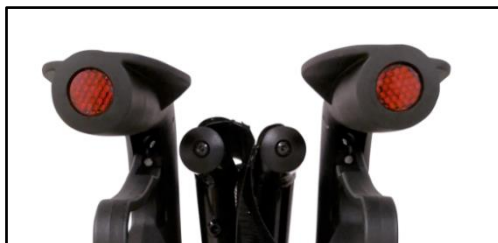

7. Pulizia

Generale:

- Eseguire il lavaggio periodico del dispositivo e mantenerlo pulito.
- Le impurità più leggere e la polvere possono essere rimosse con un panno umido.
- Le impurità maggiori possono essere rimosse con un detergente delicato per la casa (disponibile in commercio) e acqua calda.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o detersivi a base di candeggina in quanto si può danneggiare o scolorire il prodotto.
- Asciugare le parti con un panno morbido.


Ruote:

- Pulire le ruote con acqua tiepida e un detergente per la casa delicato (disponibile in commercio). Asciugare con un panno pulito.
- Lubrificare periodicamente con olio universale o quando le ruote iniziano a scricchiolare.

Per la disinfezione contattare il rivenditore per assicurarsi che sia stata eseguita da personale qualificato. Tuttavia, per l'uso individuale, si consiglia l'uso di disinfettanti privi di cloro e fenolo disponibili in commercio. Il produttore non è responsabile di danni causati dall'uso improprio dei prodotti disinfettanti.

8. ETICHETTA

La marcatura del prodotto sotto forma di etichetta si trova nella parte inferiore del telaio principale e si presenta così:

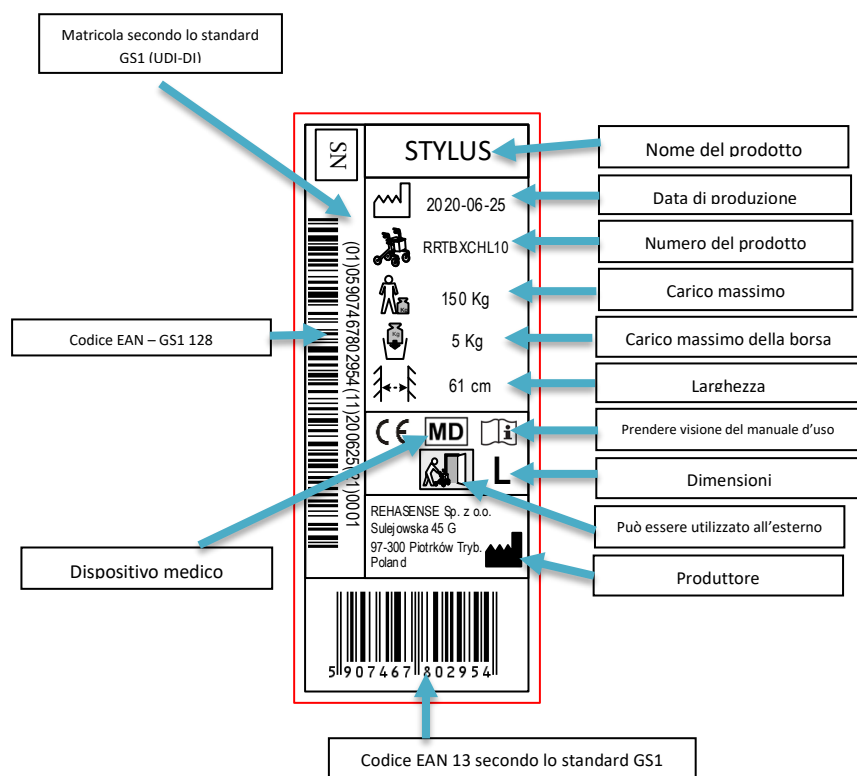

9. Caratteristiche tecniche

STYLUS - Girello deambulatore in alluminio con quattro ruote	
Dimensioni del telaio	Large - largo
Altezza dell'utente consigliata	150-200 cm
Peso massimo dell'utente	150 kg
Peso (accessori esclusi)	5,95 kg
Peso complessivo (borsa, schienale, porta stampelle)	6,5 kg
Altezza di regolazione delle maniglie	76-94 cm (8 livelli)
Maniglie	ergonomiche
Distanza tra le maniglie	45 cm
Altezza	67 cm
Larghezza in posizione aperta	60 cm
Larghezza in posizione piegata	21 cm
Altezza in posizione piegata	81 cm
Larghezza del sedile	44 cm
Altezza del sedile	60 cm
Profondità del sedile	18,5 cm
Carico massimo della borsa della spesa	5 kg
Distanza tra la maniglia e la leva del freno (per attivare i freni)	64 mm
Freni	n. 2 freni con funzione di bloccaggio delle ruote posteriori
Ruote (diametro x larghezza)	200 x 35 mm
Raggio di curva	85 cm

10 Trasporto

Il girello è un prodotto facilmente ripiegabile e comodo per il trasporto. Si consiglia di trasportare in posizione piegata come descritto sopra. Durante il trasporto assicurarsi che il prodotto sia in una posizione stabile senza possibilità di spostamento.

11 assistenza e manutenzione

Il girello deve essere ispezionato regolarmente.

- Assicurarsi che tutte le parti e gli accessori siano a posto e stabili
- Verificare se tutte le viti siano serrate. In caso contrario, serrare secondo necessità
- Sostituire immediatamente le parti rotte, danneggiate o usurate
- Controllare l'impianto frenante di entrambi i freni e se i freni a mano funzionino correttamente.

In caso di danni visibili, richiedere la diagnosi e la manutenzione al rivenditore locale.

Si consiglia di chiedere al rivenditore di effettuare un'ispezione almeno ogni 12 mesi.

12 Riutilizzo

Il girello è riutilizzabile. Prima di cederlo a un altro utente, sottoporlo a controllo tecnico e disinfezione presso un centro di assistenza autorizzato

È necessario verificare i seguenti punti:

- Stabilità della struttura,
- Fissaggio sicuro di dadi e bulloni,
- Condizione degli elementi in tessuto,
- Stato di ruote e cuscinetti a sfere,
- Efficienza e stato dei freni.

Se una qualsiasi delle parti sopra menzionate è danneggiata o rotta, deve essere sostituita. Si consiglia di sostituire le ruote ad ogni cambio. Tutti i bulloni e i dadi allentati devono essere serrati. Prima del riutilizzo, il prodotto deve essere accuratamente pulito e disinfettato.

ATTENZIONE! È vietato riutilizzare il girello quando il telaio è piegato o rotto

Ogni nuovo utente deve avere e leggere il manuale d'uso.

13 Smaltimento

Il girello deve essere smaltito in conformità con le disposizioni di legge locali e nazionali applicabili. Contattare l'agenzia locale per lo smaltimento dei rifiuti o il rivenditore autorizzato per informazioni sul corretto smaltimento di imballaggi, parti del telaio in metallo, elementi di plastica e tessili

14 Garanzia

La garanzia non è valida per un uso del prodotto contrario alla sua destinazione.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da uso improprio, incidenti e/o normale usura.

Qualsiasi modifica al prodotto fa decadere la garanzia. I danni meccanici non sono coperti da questa garanzia.

Per le riparazioni durante il periodo di garanzia, contattare il rivenditore locale

In caso di problemi tecnici, contattare il proprio rivenditore. Si può contattare anche direttamente Rehasense®.

Venditore

Rehasense® Europe

Produttore

Rehasense® Sp.z o.o.
Sulejowska 45 G
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

www.rehasense.com
info@rehasense.com

Rehasense Deutschland
Briener Strasse 25
47533 Kleve
Deutschland

