

Manuale d'uso

SPACE LX

Deambulatore leggero in alluminio

SPACE CF

Deambulatore in fibra di carbonio (CF).



più della mobilità

1 Informazioni generali

Gentile Cliente,

il presente manuale d'uso offre una descrizione del dispositivo medico e le linee guida importanti per garantire l'uso sicuro e corretto del prodotto. È importante di leggere con attenzione il presente manuale prima dell'uso del prodotto. È di particolare importanza leggere le istruzioni di sicurezza e rispettarle.

REHASENSE continua a sviluppare i propri prodotti e si riserva il diritto di cambiare le specifiche e le funzioni del prodotto senza preavviso.

In caso di qualsiasi domanda, si prega di contattare il proprio rivenditore o **Rehasense** direttamente. I recapiti di contatto sono consultabili all'ultima pagina del presente manuale.

2 Uso previsto, Indicazioni & Controindicazioni

Uso previsto: Il deambulatore è stato progettato come strumento per aiutare a camminare le persone che hanno problemi di mobilità, ad esempio con stare in piedi, camminare o sedere in modo indipendente. Grazie al deambulatore tali persone possono stare in piedi, camminare e riposare facilmente e possono svolgere la maggior parte delle loro attività e routine quotidiane senza l'assistenza altrui. È vietato qualsiasi altro utilizzo.

Indicazioni: Il dispositivo è stato specificamente progettato per le persone che, a causa di un'ampia varietà di possibili problemi di salute, richiedono un supporto stabile aggiuntivo durante la deambulazione.

Controindicazioni: Il dispositivo non può essere utilizzato da utenti che hanno gravi problemi di equilibrio del corpo o la cui forza muscolare è troppo bassa per poter stare in piedi e camminare, anche con il supporto aggiuntivo di un deambulatore. La necessità e la possibilità di utilizzo di un deambulatore da parte dell'utente devono sempre essere valutate e indicate da un medico o fisioterapista.

3 Consegna & descrizione generale del prodotto

I deambulatori sono consegnati in scatole, piegati, per facilitare il trasporto.

La scatola contiene:

- ✓ 1 deambulatore completo, piegato
- ✓ 1 set di supporti per stampelle (in un sacchetto)
- ✓ 1 manuale d'uso

SPACE LX/CF è un deambulatore leggero a quattro ruote con un telaio pieghevole a croce. Il prodotto è realizzato in alluminio o fibra di carbonio, quindi è leggero e facile da riporre o trasportare. Il deambulatore offre una grande manovrabilità, stabilità e le sue maniglie di spinta sono regolabili in altezza per adattarsi facilmente all'utente. Il prodotto è costituito da una struttura pieghevole verniciata a polvere in tubolare di alluminio o fibra di carbonio e da una croce pieghevole. È inoltre dotato di un sedile in nylon e di una borsa per la spesa che consente all'utente di metterci e trasportare piccoli oggetti.

4 Requisiti di sicurezza

Assicurarsi che il presente manuale d'uso sia letto da tutte le persone che utilizzano il dispositivo. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni e/o lesioni causati dal mancato rispetto del manuale d'uso.



Limitazioni d'uso

- Non sovraccaricare il dispositivo oltre il peso massimo di 150 kg.
- La borsa del dispositivo ha un limite di carico di 5 kg.
- Il dispositivo è concepito per essere utilizzato all'interno e/o all'esterno su superfici piane.
- Il dispositivo non è progettato per essere semovente da persone sedute
- I freni DEVONO essere in posizione bloccata PRIMA di utilizzare il sedile.



Evitare gli incidenti

- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo a cui è destinato.
- Utilizzare il dispositivo solo in buone condizioni tecniche.
- Evitare di apportare modifiche costruttive al dispositivo, a meno che non si disponga dell'accettazione scritta del produttore per tali modifiche.
- Durante le diverse regolazioni possibili sul dispositivo, l'utente deve fare attenzione a non intrappolare le proprie dita o altre parti del corpo tra due elementi mobili del dispositivo
- Il dispositivo deve essere utilizzato solo su una superficie stabile.
- Tutte le ruote DEVONO essere a contatto con il pavimento TUTTO IL TEMPO durante l'uso. Ciò garantirà che il deambulatore sia adeguatamente bilanciato e dovrebbe permettere di evitare incidenti.
- Quando si utilizza il deambulatore in posizione stabile, i freni a mano DEVONO essere bloccati.


SE SI VERIFICA QUALSIASI INCIDENTE GRAVE IN RELAZIONE AL DISPOSITIVO, CONTATTARE IL RIVENDITORE O REHASENSE DIRETTAMENTE (recapiti di contatto sono disponibili alla fine del manuale utente). Le azioni immediate dovrebbero essere intraprese secondo quanto richiesto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2017/745 sui dispositivi medici del 5 aprile 2017.



Attenzione alle
dita

Prestare attenzione quando si vede questo simbolo sul dispositivo. Le dita o altre parti del corpo di un utente e/o di un assistente possono essere intrappolate tra le parti del dispositivo durante il piegamento, l'apertura o la regolazione. Prestare la massima attenzione durante la regolazione del dispositivo. Osservare le dimensioni degli spazi tra gli elementi del dispositivo per evitare di intrappolare le dita o altre parti del corpo.

5 Dettagli del prodotto

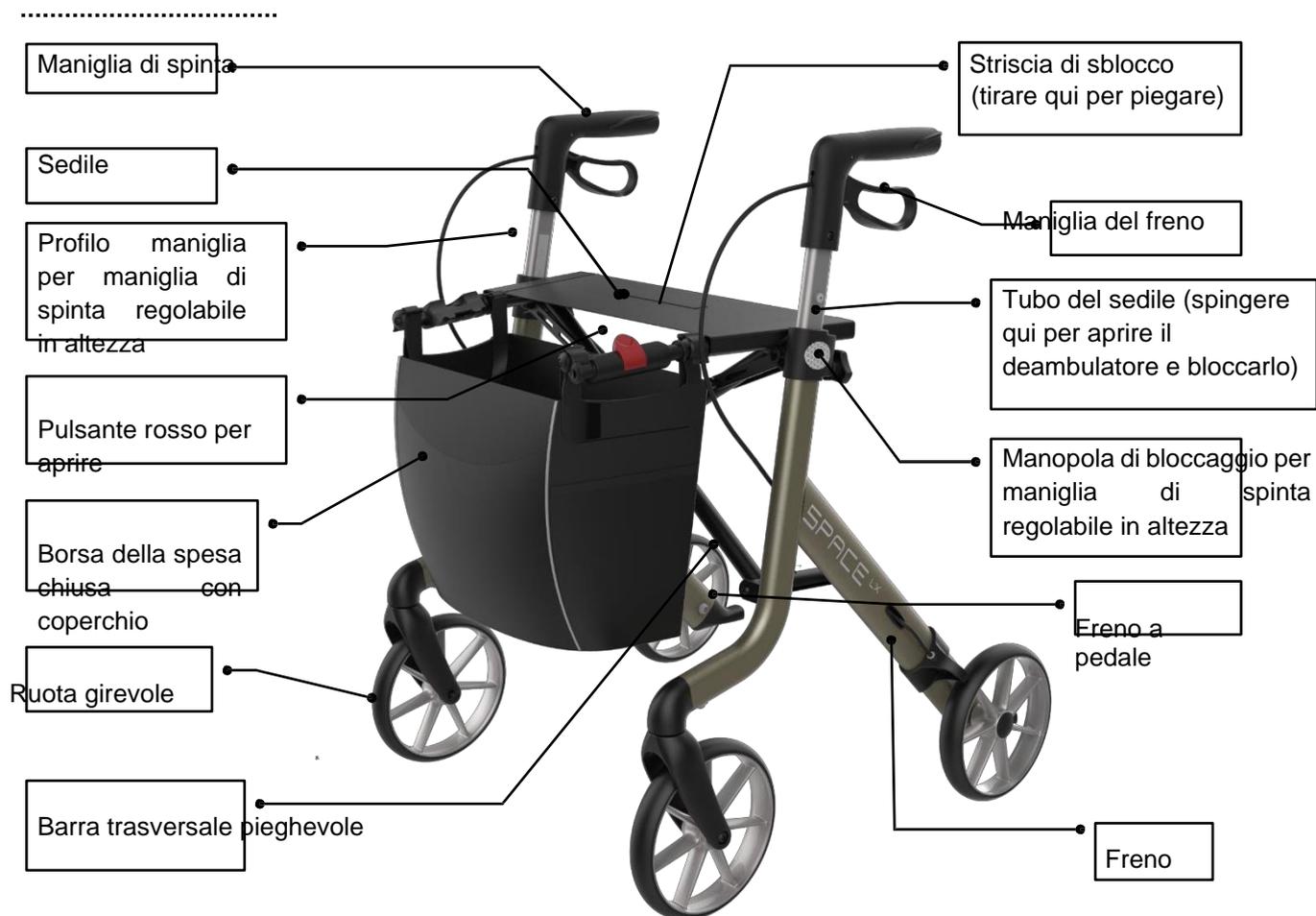

6 Utilizzo

Guardando l'immagine sopra, il dispositivo dovrebbe essere preparato per l'uso in modo intuitivo. Tuttavia, si consiglia di seguire i passi seguenti:

Controllo iniziale

- In primo luogo estrarre il dispositivo dalla scatola e verificare (usando l'immagine sopra) che non manchi nulla. Se in questa fase si scopre che qualche parte è mancante o danneggiata non continuare ad assemblare il prodotto. Contattare subito il fornitore del prodotto.

Apertura del deambulatore

Premere il pulsante rosso che blocca i tubi del sedile

Tenere entrambi i tubi del sedile e spingerli contemporaneamente verso il basso fino a sentire un "clic" del meccanismo di blocco del telaio.

Provare a tirare indietro i tubi del sedile per piegare il telaio.

Se ciò è impossibile, il telaio è stato aperto e fissato correttamente.

Vedere la posizione APERTO nella foto soprastante.





Dopo aver aperto o assemblato il deambulatore, assicurarsi sempre che il supporto del sedile sia bloccato saldamente dal meccanismo della striscia di sblocco per fissare la serratura e che il telaio non si muova più.

Assicurarsi sempre che entrambi i tubi della maniglia di spinta siano saldamente bloccati nel tubo di supporto principale con le due manopole ad alette per evitare lo scivolamento accidentale dei tubi della maniglia di spinta quando forzati.

Eeguire sempre una prova per verificare se tutti gli accessori siano bloccati correttamente e sicuramente nella loro sede PRIMA dell'uso del prodotto. Il mancato rispetto di tali avvertenze può portare a lesioni personali.

Come piegare il prodotto

- Sollevare la striscia di blocco sul sedile per piegare il deambulatore.
- Piegare il deambulatore fino alla chiusura della serratura.

Come regolare l'altezza delle maniglie di spinta

- Rilasciare il pomello di blocco della maniglia,
- Regolare fino all'altezza desiderata.
- Stringere la manopola.



- *Entrambe le maniglie di spinta devono essere regolate alla stessa altezza.*
- *Le impugnature regolate correttamente devono essere all'altezza dei fianchi dell'utente.*
- *Non lasciare mai il dispositivo senza freni attivati.*

Come utilizzare i freni a mano

- PER ARRESTARE IL DEAMBULATORE è sufficiente tirare le maniglie dei freni in alto verso le impugnature.
- PER RIMANERE STABILI tenere le maniglie del freno in posizione "SU".
- La forza frenante può essere aumentata premendo/tirando più saldamente le maniglie del freno.
- PER INIZIARE A MUOVERSI rilasciare le maniglie del freno. Cadranno automaticamente e i freni verranno rilasciati.



- *Bisogna sempre attivare i freni quando non si prevede di spostare il dispositivo.*
- *Non lasciare mai il dispositivo senza i freni inseriti quando c'è qualcuno seduto al suo interno!*
- *Non lasciare mai il dispositivo in pendenza senza freni attivati.*
- *Non sedersi mai troppo indietro. Non sedersi (in parte) sopra la borsa della spesa.*
- *Sedersi sempre in posizione eretta quando si è seduti sul deambulatore con gli avambracci o le mani leggermente appoggiati sulle maniglie di spinta.*
- *Non inclinarsi mai all'indietro quando si è seduti sul deambulatore*

Come bloccare / sbloccare i freni a mano

- Per bloccare i freni premere le maniglie del freno in basso fino a sentire un "clic".
- Per sbloccare i freni tirare le maniglie del freno in alto fino a sentire che si siano allentati.



- *Quando si utilizza il deambulatore in posizione stabile, i freni a mano DEVONO essere sempre bloccati.*

7 Pulizia

Pulizia generale:


- Pulire il dispositivo con frequenza regolare e mantenerlo pulito.
- Per rimuovere lieve sporco e polvere si può utilizzare un panno morbido.
- Lo sporco più grande possono essere rimosso con un detergente delicato non corrosivo e acqua calda.
- Non utilizzare gli abrasivi aggressivi o detersivi a base di candeggina, poiché ciò potrebbe causare danni o scolorimento.
- Asciugare le parti con un panno morbido.

Ruote:

- Pulire le ruote con acqua tiepida e un detergente delicato. Asciugare con uno straccio pulito.
- Lubrificare periodicamente con olio multiuso o quando le ruote iniziano a cigolare.

8 Esempio di etichetta

L'etichetta del prodotto si trova all'interno di uno dei tubi verticali del telaio laterale. Contiene le informazioni importanti sul prodotto: nome, numero di serie, data di produzione, numero articolo, peso massimo dell'utente, carico massimo della borsa della spesa, larghezza del prodotto, dimensioni e dati del produttore. Non rimuovere mai l'etichetta dal dispositivo.

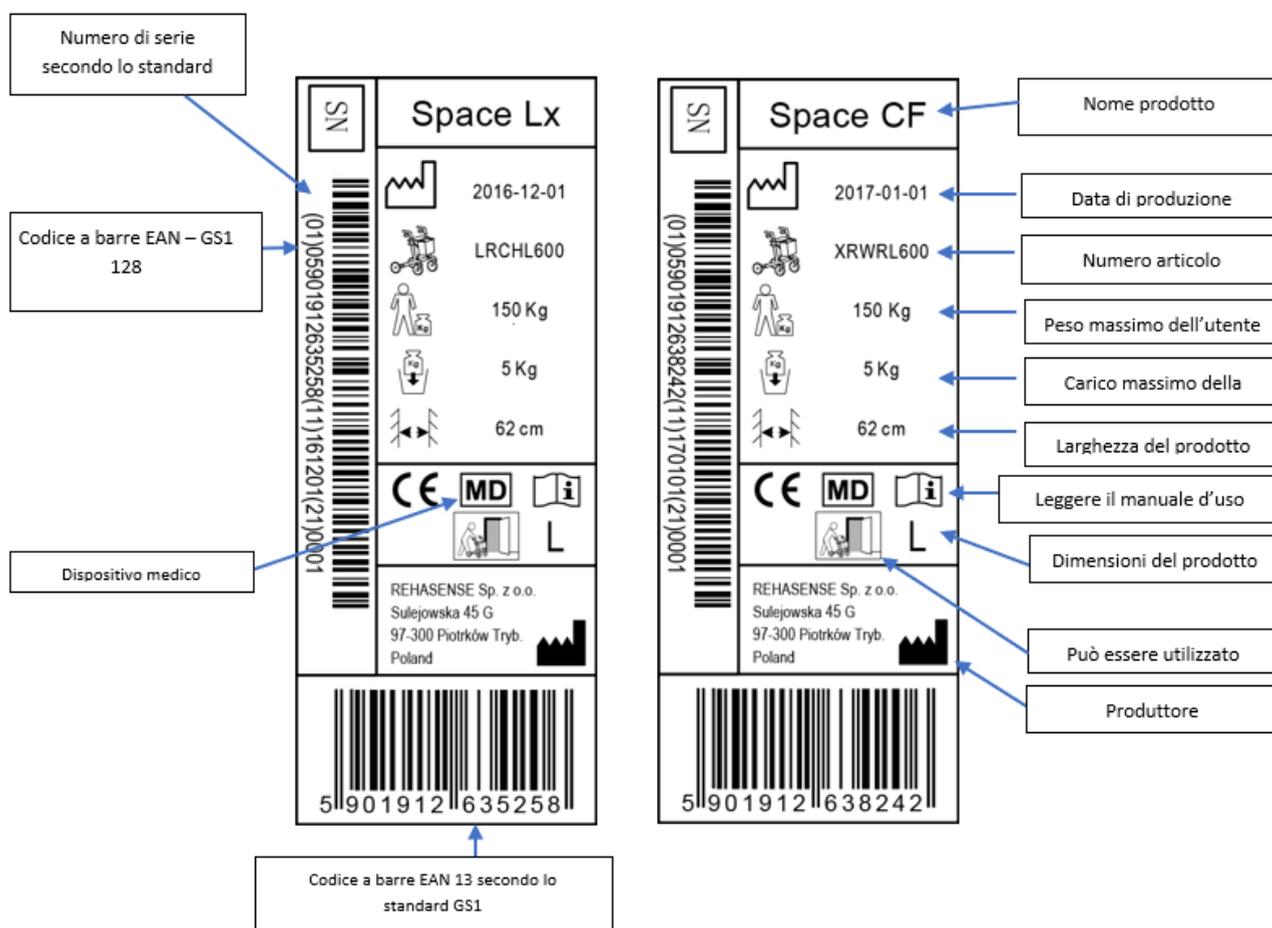

9 Specifiche tecniche

“SPACE LX/CF” Deambulatore leggero		
Dimensioni	Alluminio	Fibra di carbonio
Peso massimo dell'utente	150 kg	150 kg
Carico massimo della borsa	5 kg	5 kg
Peso completo senza borsa della spesa	6,1 kg	5,3 kg
Borsa della spesa chiusa con coperchio	0,43 kg	0,43 kg
Lunghezza	66 cm	66 cm
Altezza totale se piegato (punto più basso)	86 cm	86 cm
Larghezza se aperto	62 cm	62 cm
Larghezza se piegato	22 cm	22 cm
Larghezza sedile	46 cm	46 cm
Altezza delle impugnature (regolabile)	78 – 102 cm	78 – 102 cm
Altezza del sedile	63 cm	63 cm
Freni	n. 2 freni a mano di manovra con funzione di parcheggio	
Ruote (diametro x larghezza)	200 x 35 mm	200 x 35 mm

10 Trasporto

Il deambulatore può essere facilmente piegato, il suo trasporto è comodo. Se è necessario trasportarlo raccomandiamo di piegarlo come descritto in seguito. Il deambulatore deve essere trasportato in posizione stabile, senza rischio di movimenti bruschi e pericolosi del dispositivo trasportato.

11 Manutenzione

- Assicurarsi che tutte le parti del deambulatore siano SEMPRE al sicuro.
- Controllare che tutte le viti siano serrate. In caso contrario, serrare se necessario.
- Sostituire immediatamente eventuali articoli rotti, danneggiati o usurati.

12 Riutilizzo

Il deambulatore è adatto per il riutilizzo. Prima di passarlo a un altro utente, deve essere sottoposto ad un controllo da parte di un rivenditore specializzato.

Verificare i seguenti punti:

- Ispezione visiva del telaio
- Posizionamento sicuro di dadi e bulloni
- Stato degli elementi in plastica
- Stato delle ruote e dei cuscinetti a sfere
- Efficacia e stato dei freni

Se una delle parti è danneggiata o rotta, deve essere sostituita con una nuova. Si raccomanda di sostituire le ruote con ogni cambio del proprietario. Serrare tutte le viti e dadi allentati. Pulire accuratamente il prodotto e disinfettarlo prima dell'uso.

AVVERTENZA! È vietato riutilizzare il deambulatore quando il telaio è piegato o rotto. Il manuale d'uso deve accompagnare il deambulatore con ogni cambio del proprietario

13 Smaltimento del prodotto

Non smaltire il prodotto con rifiuti urbani. Consegnarlo all'azienda specializzata al riutilizzo o riciclaggio.

14 Garanzia

Il produttore offre la garanzia di 7 anni a titolo di difetti di produzione. La garanzia non è valida in caso di uso improprio del prodotto. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da un uso improprio, incidenti e/o dalla normale usura. Per le riparazioni durante il periodo di garanzia, contattare il rivenditore locale.

In caso di problemi tecnici contattare il proprio rivenditore. Si può anche contattare Rehasense® direttamente.

Timbro del rivenditore:

Rehasense ® Europe

Produttore

Rehasense Sp. z o.o.

Sulejowska 45 g

97-300 Piotrków Trybunalski

Polonia

www.rehasense.com

info@rehasense.com



REHASENSE